

ardo pumpsets

WELCHE GRÖSSE PASST?











9904.551 / V01/04.2024

Für alle Ardo Pumpsets ausser den Hands-Free Pumpsets

Die Brustglocke passt wenn:

- rund um die Brustwarze ca. 2 mm Platz frei bleibt
- die Brustwarze sich frei im Trichter bewegt und den rhythmischen Bewegungen der Pumpe folgen kann.
- sich kein Gewebe des Brustwarzenhofes im Trichter befindet.
- die Milch fliesst und sich die Brust nach dem Abpumpen überall weich anfühlt.

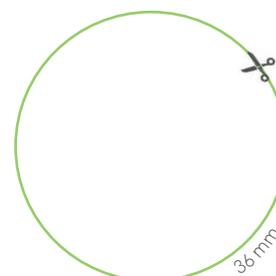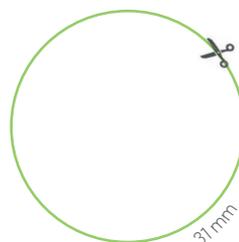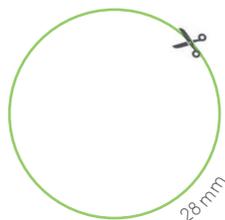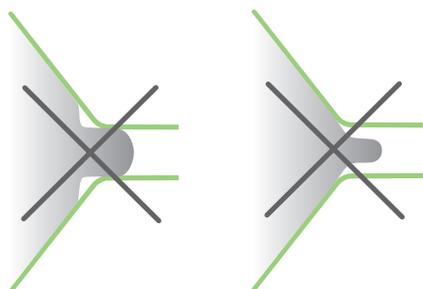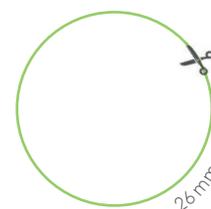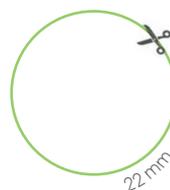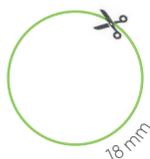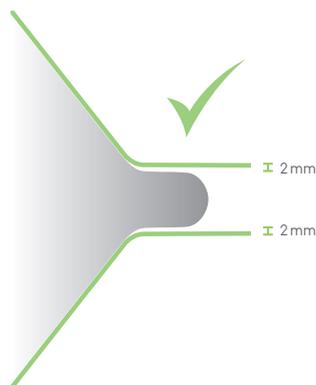

Bitte diese Vorlage im Druckermenü mit 100% Grösse ausdrucken.