

UNTERSTÜTZT BEI KINDERWUNSCH



www.fertilily.ch



GENIAL EINFACH: FERTI·LILY KINDERWUNSCH EMPFÄNGNISHILFE


Die flexible Empfängnishilfe FERTI·LILY erhöht die Chancen, ohne Hormone, Ärzte oder medizinische Prozeduren, zu Hause schwanger zu werden – so bleiben Intimität und Romantik erhalten.

FERTI·LILY wird nach dem Samenerguss eingeführt, sodass so viele Spermien wie möglich zum Muttermund gelangen und damit mehr Spermien in die Gebärmutter schwimmen können.

Bequeme und einfache Anwendung: FERTI·LILY hält die Spermien am richtigen Ort fest, sogar beim Wasserlassen oder beim Duschen – für freie Bewegung nach dem Sex.

Die Empfängnishilfe bietet hohen Komfort beim Einführen, Tragen und Entfernen. Sie kann bis zu 6 Monate oder 6 Monatszyklen verwendet und dabei während 20 bis 60 Minuten nach dem Geschlechtsverkehr getragen werden.



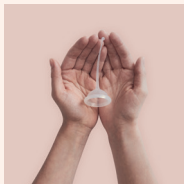

FERTI·LILY SCHÜTZT DIE SPERMIEN

FERTI·LILY schützt die Spermien, damit sie nicht zu lange dem Scheidenmilieu ausgesetzt sind, wo ein saurer pH-Wert herrscht, der die Aktivität der Spermien verlangsamt.



SO FUNKTIONIERT FERTI·LILY

Nachdem Ihr Partner seinen Samenerguss in Ihnen hatte, nehmen Sie FERTI·LILY, ohne sich hinzusetzen oder aufzustehen, damit Sie keine Spermien verlieren. Stülpen Sie die Empfängnishilfe um, sodass sie wie ein Regenschirm aussieht, und führen Sie die Empfängnishilfe gemäß Anleitung ein.



FERTI·LILY RICHTIG EINSETZEN

Führen Sie die umgestülpte Empfängnishilfe in Ihre Scheide ein. Sobald Sie am oberen Ende des Scheidenkanals angekommen ist, halten Sie die Empfängnishilfe mit dem eingeführten Finger an ihrem Platz fest und ziehen Sie vorsichtig am Schaft, um die FERTI·LILY in ihre Ausgangsform zurückzustülpen.



SPASS HABEN



UMSTÜLPEN



EINFÜHREN



ZURÜCKZIEHEN



20 MIN. WARTEN



ENTFERNEN



REINIGEN

ERHÄLTlich IN IHRER APOTHEKE ODER ONLINE

PhC: 7781028 | Art. Nr. 63.00.375

CHF 49.50 | inkl. MWST



99.04.373 | 10.2020 | V01

Vertrieb in der Schweiz:

Ardo medical AG | Gewerbstrasse 19 | 6314 Unterägeri | Schweiz

T +41 (41) 754 70 70 | F +41 (41) 754 70 71 | www.fertilily.ch

 ARDO