

# AIDE A LA CONCEPTION



[www.fertilylily.ch](http://www.fertilylily.ch)



# D'UNE SIMPLICITE DECONCERTANTE: COUPE DE CONCEPTION FERTI·LILY

La coupe de conception flexible FERTI·LILY améliore les chances de tomber enceinte à la maison sans hormones, prise en charge ou autre procédure médicale – pour la préservation de l'intimité et du romantisme.

La coupe FERTI·LILY est insérée suite à l'éjaculation afin d'amener autant de sperme que possible jusqu'au col de l'utérus et de permettre la pénétration d'un plus grand nombre de spermatozoïdes dans l'utérus.

Une application confortable et aisée: la coupe FERTI·LILY maintient les spermatozoïdes là où il faut, même en cas de miction ou sous la douche, pour une liberté de mouvement post-coït.

La coupe de conception est très confortable lors de son introduction, de son port et de son retrait. Elle peut être utilisée pendant 6 mois ou 6 cycles d'ovulation maximum et être portée à chaque fois pendant 20 à 60 minutes suite au rapport sexuel.





## FERTI·LILY PROTEGE LES SPERMATOZOIDES

La coupe FERTI·LILY protège le sperme afin d'éviter son exposition prolongée au milieu vaginal où règne un pH acide qui ralentit l'activité des spermatozoïdes.



## FONCTIONNEMENT DE FERTI·LILY

Après que votre partenaire ait éjaculé en vous, prenez la coupe FERTI·LILY sans vous asseoir ni vous lever afin de ne pas perdre de sperme.

Retournez la coupe de conception de sorte qu'elle ressemble à un parapluie et insérez-la conformément aux instructions.



## POSE CORRECTE DE LA COUPE FERTI·LILY

Insérez la coupe de conception retournée dans le vagin. Arrivée à l'extrémité supérieure du canal vaginal, maintenez la coupe de conception en place à l'aide du doigt inséré et tirez avec précaution sur la tige pour permettre à la coupe de conception FERTI·LILY de retrouver sa forme d'origine.



FAIRE L'AMOUR



RETOURNER



INTRODUIRE



DEPLOYER



ATTENDRE 20 MIN



RETIRER



NETTOYER

# DISPONIBLE EN PHARMACIE OU EN LIGNE

CPh: 7781028 | N° réf. 63.00.375

CHF 49.50 | TVA incl.



99.04.374 | 10.2020 | V01

Distribution en Suisse:  
Ardo medical SA | Gewerbstrasse 19 | 6314 Unterägeri | Suisse  
T +41 (41) 754 70 70 | F +41 (41) 754 70 71 | [www.fertilily.ch](http://www.fertilily.ch)

 **ARDO**